



EULATIN® NH Salbe

Medizinprodukt zur Erleichterung des Stuhlgangs bei Hämorrhoiden

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Anwendungszweck

Eulatin® NH Salbe erreicht eine physikalische Erleichterung des Stuhlgangs durch Einfetten des Mastdarms, des Darmausgangs und dient dem Schutz der nicht perforierten Analschleimhaut bei Hämorrhoiden. Das Produkt verbessert die Gleitfähigkeit des Stuhls, vermindert die Druckbelastung durch den Stuhl und schützt die Schleimhaut vor Einreißen und Juckreiz.

2. Anwendungsgebiete

Eulatin® NH Salbe ist gebrauchsfertig anwendbar bei inneren und äußeren Hämorrhoiden im Endbereich des Mastdarms und des Anus für den physikalischen Schutz der nicht perforierten Anwendungsregion erwachsener Personen sowie zur Prävention des erkrankungsbedingten Juckreizes.

Das Produkt ist in der professionellen Pflege von Kranken, Behinderten und Senioren sowie für den häuslichen Gebrauch einsetzbar.

3. Nebenwirkungen

Nebenwirkungen sind bei bestimmungsgemäßer Anwendung des Produktes nicht bekannt.

4. Gewebeverträglichkeit, Wechselwirkungen

Es liegen keine Daten vor, die auf eine Gewebeunverträglichkeit des Produktes schließen lassen.

Eulatin® NH Salbe sollte nicht gleichzeitig mit anderen Cremes und Salben im Analbereich sowie mit rektal einzuführenden Medikamenten angewendet werden.

5. Gegenanzeigen

Eulatin® NH Salbe darf nicht angewendet werden bei bekannter Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe.

Achtung:

Während der Schwangerschaft oder Laktation darf das Produkt nicht angewendet werden.

6. Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei Blutabgang oder bei Verdacht auf Blut im Stuhl sowie bei gleichzeitigem Auftreten von Schmerzen und Fieber ist von einer Anwendung des Produktes abzusehen.

Das Produkt ist ausschließlich zur Anwendung an der Behandlungsregion bestimmt und darf nicht durch Einnahme in den Körper gelangen.

Achtung:

Sicher und nicht in Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

Achtung:

Bei der Anwendung von *Eulatin® NH Salbe* im Analbereich kann es wegen der Hilfsstoffe Vaselin und Paraffin bei gleichzeitiger Anwendung von Kondomen aus Latex zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

7. Produkteigenschaften

Hämorrhoiden verursachen Beschwerden, die je nach Ausprägung der Erkrankung zu Juckreiz, Blutung, Entzündung oder Thrombose führen können. Besonders beim Stuhlgang treten starke Schmerzen auf. Reflektorisches stellt sich wegen der starken Schmerzen bei der Stuhlentleerung eine Verstopfung ein, noch intensiveres Pressen beim Stuhlgang ist nötig, das zur weiteren Vergrößerung vorhandener Hämorrhoiden führt.

Eulatin® NH Salbe fettet den Afterkanal vor und schützt die Hämorrhoiden. Der Stuhl kann durch den vorgefetteten Afterkanal besser hindurchgleiten. Die Stuhlentleerung kann somit unter geringerem Druck erfolgen, wodurch schmerzhaftes Pressen vermieden wird. Darüber hinaus wird die Analschleimhaut optimal durch die abdeckenden Eigenschaften des Produktes vor Verletzungen geschützt.

8. Produktanwendung

Vor jeder Anwendung von *Eulatin® NH Salbe* sollten die Analgegend vorsichtig und die Hände mit lauwarmem Wasser gereinigt werden.

Bei äußeren Hämorrhoiden ist der Tube ein 2-3 cm langer Salbenstrang zu entnehmen und mit sauberen und unverletzten Fingern direkt aufzutragen.

Zur Anwendung im Mastdarm (bei inneren Hämorrhoiden) den beiliegenden Applikator (Zubehör) auf die Tube schrauben und die Spitze mit dem Produkt gleitfähig machen. Danach den Applikator vorsichtig in den After einführen und durch ein- bis zweimaliges Drücken auf die Tube das Produkt unter Drehbewegung im After verteilen. Nach Gebrauch den Applikator gründlich mit lauwarmem Seifenwasser äußerlich reinigen.

Zur Schonung der Kleidung empfiehlt sich die Abdeckung des Anwendungsgebietes mit Zellstoff o.ä..

Eulatin® NH Salbe 2-3 mal täglich bzw. vor jedem Stuhlgang in den After mittels beigefügtem Applikator einführen.

Die durchgehende Anwendungsdauer sollte 4 Wochen nicht überschreiten.

Aufgebrauchte Gebinde vorzugsweise getrennt über Hausmüll, überlagert oder nicht aufgebrauchte Gebinde über Apotheken entsorgen.

9. Physikalische Produktdaten

Zusammensetzung:

Eulatin® NH Salbe enthält:

weißes Vaselin, Wollwachs, Wollwachsalkoholsalbe, medizinische Hefe, gereinigtes Wasser, mittelkettige Triglyceride, Hartparaffin, hochdisperses Siliciumdioxid, Tannin, basisches Bismutgallat, Hamamelisrindenfluidextrakt

Aussehen, Geruch: gelbliche Salbe, geruchlos

Halbbarkeit: 2 Jahre

Das Verfalldatum ist auf der Tube und auf der Umverpackung des Produktes angegeben.

Lagerbedingungen:

Eulatin® NH Salbe ist bei Raumtemperatur, nicht über 25 °C, zu lagern. Tube nach Gebrauch wieder fest verschließen.

10. Lieferspezifikation

Die Umverpackung des Produktes enthält:

Tube mit 30 g oder 60 g Inhalt

Zubehör: Applikator für innere Anwendung im Mastdarm

11. Hersteller / Vertreiber

Hersteller des Medizinproduktes:

Euro Vital Pharma GmbH

Borsteler Chaussee 49

22453 Hamburg

Phone + 49 40 529526-900

Email info@eurovitalpharma.com

Vertreiber des Medizinproduktes:

Abanta Pharma GmbH

Reichsstraße 78

58840 Plettenberg

Hinweis:

Bitte Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller



-25 °C

Temperaturbegrenzung



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung/Chargennummer



Gebrauchsanweisung beachten

Stand der Information: 03/2017

